

Noppy

Plaswekker



Noppy

Bedplassen; uw kind is echt niet de enige! Wanneer een kind na de kleutertijd nog regelmatig in bed plast, zonder dat er sprake is van een medische oorzaak, spreken we van bedplassen. Er zijn veel kinderen die hier last van hebben en regelmatig 's nachts in bed plassen.

Er is iets aan te doen

Wanneer een kind in bed plast is dit vervelend en lastig voor zowel het kind als de ouders, maar onbewust plassen tijdens de slaap is te verhelpen met een plaswekker van Van Lent Systems.

De Noppy plaswekker

Bijzonder gebruiksvriendelijk, licht en compact en kan als horloge zowel links als rechts om de pols gedragen worden.

Hoe werkt de Noppy plaswekker?


De plaswekker wordt om de pols bevestigd. Het kabeltje van de plaswekker wordt via de pyjama naar het eigen ondergoed geleid. Door middel van drukknopjes wordt het kabeltje aan het eigen ondergoed bevestigd. Zodra de sensoren in de drukknopjes nat worden, reageert de plaswekker direct door middel van een alarmtoon die het kind wekt.

Training met behulp van een plaswekker

Een plaswekker leert het kind wakker te worden van het gevoel van een volle blaas. De plaswekker geeft direct een alarmtoon zodra het kind enkele druppels urine verliest en waarschuwt zo het kind om te stoppen met plassen. Het kind wordt vervolgens wakker en kan dan rustig op de WC verder plassen. Na verloop van tijd heeft het kind geleerd om bij een volle blaas vanzelf wakker te worden.

Wordt de plaswekker vergoed?

Ja, indien u aanvullend bent verzekerd, vergoeden bijna alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk de Noppy plaswekker. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een gemotiveerde (schriftelijke) verklaring van uw behandelend (huis-)arts nodig.

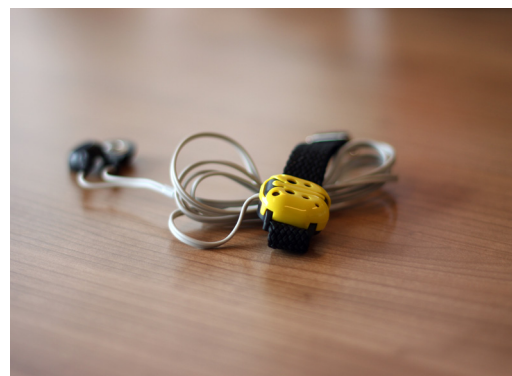

Van Lent Systems B.V.
Dommelstraat 34
5347 JL Oss
www.vanlentsystems.com
info@vanlentsystems.com
Tel: 0412 640 690
Fax: 0412 626 025