

Over Van Lent Systems

VAN LENT SYSTEMS B.V. te Oss beschikt over een eigen lijn van medische producten onder andere voor pijnbestrijding (TENS), slechthoortheid en incontinentie; allemaal moderne hightech elektronische apparatuur.

Wij leveren niet alleen kwalitatief goede TENS-apparaten, we verlenen daarbij ook de best mogelijke service en vertellen u graag, hoe u het meeste profijt kunt hebben van de door ons geleverde producten. Heeft u een klinisch-wetenschappelijke vraag? Bel of mail ons. Casuïstiek is onze passie.

We beschikken over meer dan 35 jaar ervaring. Het is onze missie om deze kennis en ervaring te mogen delen met iedereen die zich inspant voor betere zorg voor de patiënten. Daarnaast hebben wij de beschikking over een groot, internationaal netwerk welke we graag inzetten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Vanuit onze expertise bieden wij ook gerichte cursussen aan voor zorgmedewerkers. We zijn gevestigd in Nederland, België, Duitsland en Ierland.

Contactgegevens

Distributeur Nederland

Van Lent Systems B.V.
Dommelstraat 34
5347 JL Oss, Nederland
www.vanlentsystems.com
E-mail: info@vanlentsystems.com
Tel: +31 (0) 412 – 640 690
Fax: +31 (0) 412 – 626 025

Distributeur België

Van Lent Systems Belgium
Hubert Verschraegenlaan 2
9150 Kruikebeke, België
www.vanlentsystems.be
E-mail: info@vanlentsystems.be
Tel: +32 (0) 3 – 434 09 10



Scan de code voor meer informatie over Dysmenorroe:



Als u voor uw praktijk of kliniek meer flyers wilt ontvangen ten behoeve van informatie aan uw patiënten, neem dan contact met ons op.

ruimte voor praktijkstempel

NL_V1.0

TENS bij Dysmenorroe



Dysmenorroe

Wat is dysmenorroe

Dysmenorroe is het optreden van pijn en/of krampen vlak voor en/of tijdens de menstruatie.

Voorkomen

Menstruatiepijn komt heel vaak voor: Van de jonge vrouwen tussen de 12 en 24 jaar heeft ongeveer 60 tot 80% er last van, volgens het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Rond de 40% verzuimt daarom wel eens van school of werk.

De pijnklachten beginnen meestal direct na of iets voor het begin van de menstruatie. De duur van de klachten varieert van enkele uren tot drie dagen. Er is veelal krampende pijn met onderbrekingen. Daarnaast zijn soms klachten van hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid en braken aanwezig.

Oorzaken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire (geen duidelijke oorzaak) en secundaire dysmenorroe (met oorzaak, zoals endometriose of een vleesboom).

Wat is er aan te doen?

Als de oorzaak bekend is kan de behandeling hierop gericht worden. Bij primaire dysmenorroe ligt de nadruk op de pijnvermindering.

Behandeling bij primaire dysmenorroe

Voorlichting, een warme kruik op de onderbuik, en medicamenten zoals paracetamol, NSAID's (bijv. ibuprofen) of een anticonceptiepil. Of TENS.

Wat is TENS

TENS (Transcutane Elektro Neuro Stimulatie) is een niet-medicamenteuze therapie bij chronische en acute pijn. Door middel van twee of vier zelfklevende elektroden op de huid wordt met een zenuwstimulator stroompjes toegediend, en dat heeft een pijn-dempende werking.

TENS is wetenschappelijk bewezen. Zie de studieverwijzingen hiernaast.

Hoe kom ik aan TENS

Zie de alinea rechtsonder op deze zijde van de flyer.

Studieverwijzingen:

Dysmenorroe:

- (1) Yokozuka e.a. Japan 2020 - Analgesia by sacral surface electrical stimulation for primary dysmenorrhea.
- (2) Lewers e.a. USA 1989 - TENS in the Relief of Primary Dysmenorrhea.
- (3) Uttam e.a. India 2019 - Effect of High Frequency TENS on Dermatomal Site Menstrual Pain among Adolescent Girls with Primary Dysmenorrhea.
- (4) Bai e.a. China 2017 - Effect of TENS therapy for the treatment of primary dysmenorrhea.
- (5) Tugay e.a. Turkey 2007 - Effectiveness of TENS and Interferential Current in Primary Dysmenorrhea.
- (6) Wang e.a. Taiwan 2008 - Effect of TENS on Primary Dysmenorrhea.
- (7) Lauretti e.a. Italy 2014 - New portable TENS-Device Was Efficacious in the Control of Primary Dysmenorrhea Cramp Pain.
- (8) Guy e.a. France 2022 - TENS relieves primary dysmenorrhea: A randomized, double-blind clinical study versus placebo.

Pijn bij endometriose:

- (1) Mira e.a. Brazil 2015 - Effectiveness of complementary pain treatment for women with deep endometriosis through TENS: randomized controlled trial.
- (2) Bi e.a. China 2018 - Effect of NMES for endometriosis-associated pain: A retrospective study.
- (3) Armour e.a. Australia 2019 - The cost of illness and ec. burden of endometr. and chr. pelvic pain in Australia., a nat. online survey ESHRE GUIDE LINE ENDOMETRIOSIS
- (4) Sharma e.a. India 2020 - Efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation in the treatment of chronic pelvic pain

Deze flyer is slechts bedoeld als informatiemateriaal voor vrouwen die lijden aan dysmenorroe of pijn bij endometriose en voor therapeuten. Deze professionals kunnen een behandelingsprotocol bij ons opvragen.

Pijn bij endometriose

Wat is endometriose?

Endometriose is een chronische ziekte, waarbij weefsel dat (enigszins) lijkt op baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoederholte voorkomt.

Voorkomen

Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde komt endometriose voor bij 10-15% bij alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd en op ongeveer 30% bij subfertiele vrouwen (vrouwen met een verminderde vruchtbaarheid).

Oorzaken

De oorzaak van endometriose is niet bekend, maar mogelijk spelen o.a. erfelijkheid, omgevingsfactoren en de leeftijd bij de eerste menstruatie een rol.

Wat is er aan te doen?

Er is geen medicijn tegen endometriose. De behandeling is symptomatisch: Pijnmedicatie, hormonale therapie of soms een operatie. Voor de pijn-demping is TENS te overwegen.

Wat is TENS

Zie de alinea linksonder op deze zijde van de flyer.

Hoe kom ik aan TENS

Als een medisch specialist u hiervoor verwijst, gaat u naar bijvoorbeeld een (bekken)fysiotherapeut om u te laten instrueren hoe de TENS toe te passen, en wanneer. Mocht u een verwijzing hebben van een medisch specialist, dan wordt de TENS vanuit uw basisverzekering vergoed.

Zonder verwijzing kunt u hiervoor Van Lent Systems bellen of mailen. Wij helpen u graag verder met o.a. duidelijke uitleg. De kosten bedragen ongeveer €220 (prijspeil 2024).